

0483



W tym miejscu proszę przykleić SleepStrip, po wykonaniu badania. Prosimy wypełnić ankietę umieszczoną na odwrocie i przekazać swojemu lekarzowi.

Załączone patenty: Amerykański i Międzynarodowe.

#### Urząd regulacji UE:

Medes Limited  
9 Beaumont Hill, Radlett  
Herts WD7 7AR  
London, England  
Tel/Fax: +44 19238 59810

#### Wyprodukowano przez:

S.L.P. Ltd.  
P.O.Box 14014,  
Tel-Aviv, 61140, Israel  
Tel: +972 3 5371281  
Fax: +972 3 5371282  
E-mail: info@slp-med.com  
[www.slp-med.com](http://www.slp-med.com)

#### Dystrybutor:



ul. K. Jeżewskiego 5c/6  
02-796 Warszawa  
tel. (022) 644 37 22  
fax (022) 644 37 27  
e-mail: meddwe@meddwe.pl  
[www.meddwe.pl](http://www.meddwe.pl)  
[www.sleepstrip.pl](http://www.sleepstrip.pl)



# SleepStrip®

Jednorazowy aparat do badania Bezdechu Sennego

## Instrukcja użycia SleepStrip

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Składniki zestawu:  
1 aparat SleepStrip  
1 zielona naklejka  
1 gazik z alkoholem

### Uwagi i ostrzeżenia



Nie używać SleepStrip w czasie kataru, stanów zapalnych śluzówki nosa oraz innych części górnych dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia odczynów skórnych po zastosowaniu SleepStrip, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem.

Opakowanie SleepStrip otwierać bezpośrednio przed użyciem aparatu.

Opakowanie SleepStrip przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Warunki przechowywania i transportu:  
Temperatura: -10°C – 50°C, 14°F – 122°F  
Wilgotność względna (%): 10 – 90  
Ciśnienie atmosferyczne: 860 hPa – 1060 hPa

Item N0013 - PO rev. 1.0

# SleepStrip®

Jednorazowy aparat do badania Bezdechu Sennego

## Instrukcja użycia SleepStrip

- Przed użyciem SleepStrip prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją,
- Czynności opisane w poniższych punktach, należy wykonać jedną po drugiej, bez dłuższych przerw.

1. Dokładnie umyć twarz przed nałożeniem SleepStrip, usunąć zieloną naklejkę z plastra.

2. Zagiąć czujniki nosowe do przodu tak, aby po założeniu SleepStrip na twarz nie wchodziły do nosa. (Rys. 1).

3. Wyjąć gazik nasączony alkoholem z opakowania i przetrzeć nim powierzchnię wyświetlacza (Rys. 2)





4. Zieloną nalepkę przykleić dokładnie na powierzchni wyświetlacza (Rys. 3). Po wykonaniu tej czynności powinna włączyć się czerwona kontrolka.

5. Usunąć ochronną nalepkę papierową umieszczoną z drugiej strony SleepStrip i przykleić SleepStrip na twarzy. (Rys. 4). Po naklejeniu SleepStrip, czerwona kontrolka powinna przestać świecić salym światłem. Od tego momentu, przez następne 20 minut będzie się zapalała w rytm oddechu pacjenta.

**Badanie z użyciem SleepStrip powinno trwać co najmniej 5 godzin.**

6. Rano należy zdjąć SleepStrip z twarzy. Należy też zwrócić uwagę, czy zielona naklejka znajduje się na swoim miejscu, nadal dokładnie przyklejona. Kontrolka zapali się i będzie świecić przez 20 minut po zdjęciu SleepStrip z twarzy. Zapali się także po upływie 8,5 godziny od aktywacji SleepStrip, automatycznie kończąc badanie.

7. Umieścić SleepStrip we wskazanym miejscu na Karcie Kontrolnej. Wypełnić kwestionariusz znajdujący na odwrocie karty, na której przyklejony został SleepStrip.

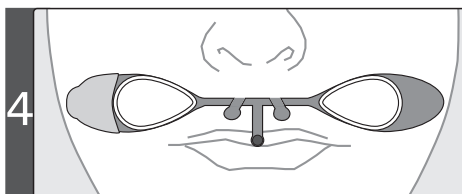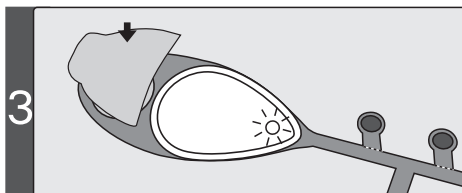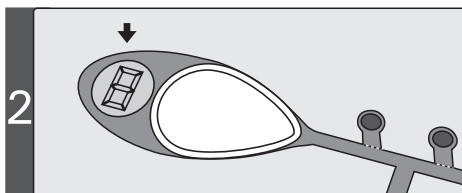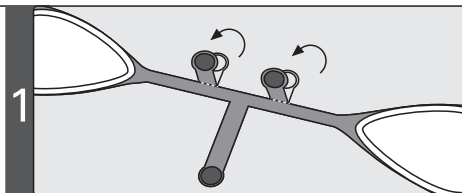

## Kwestionariusz zaburzeń oddychania podczas snu

Lekarz zlecający: \_\_\_\_\_

Imię Pacjenta: \_\_\_\_\_

Nazwisko Pacjenta: \_\_\_\_\_

Wiek: \_\_\_\_\_ Waga: \_\_\_\_\_

Wzrost: \_\_\_\_\_

Płeć: Mężczyzna / Kobieta

Czas badania SleepStrip:

Spałem/am od: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Pan/Pani chrapie? **TAK NIE**

Czy kiedykolwiek miał/a Pan/  
Pani przerwy w oddychaniu  
podczas snu? **TAK NIE**

Czy często budzi się Pan/Pani  
odczuwając zmęczenie,  
znużenie? **TAK NIE**

Czy często zdarzają się Panu/  
Pani niezamierzone drzemki  
w czasie dnia? **TAK NIE**

Czy często miewa Pan/Pani  
ból głowy po przebudzeniu? **TAK NIE**

Czy zażywa Pan/Pani środki  
nasenne? **TAK NIE**

Czy musi Pan/Pani wstawać,  
aby oddać moc w nocy? **TAK NIE**

Czy pali Pan/Pani tytoń? **TAK NIE**

Inne uwagi:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_