



SleepStrip®

Jednorazowy aparat do wykrywania Bezdechu Sennego

Dla około 80% pacjentów z wciąż niezdiagnozowanym Obturacyjnym Bezdechem Sennym istnienie skutecznej i taniej metody jego wykrycia, to bardzo dobra wiadomość.

Zalety SleepStrip®

- ▶ Badanie w domu, w naturalnych warunkach snu pacjenta
- ▶ Poręczny test, łatwy w użyciu przez pacjenta
- ▶ Niski koszt
- ▶ Dokładny, wyniki porównywalne z uzyskanymi podczas badania w pracowni badania snu (lub w warunkach szpitalnych)
- ▶ Mały, lekki, może być przesłany pocztą
- ▶ Natychmiastowe i wiarygodne wyniki.

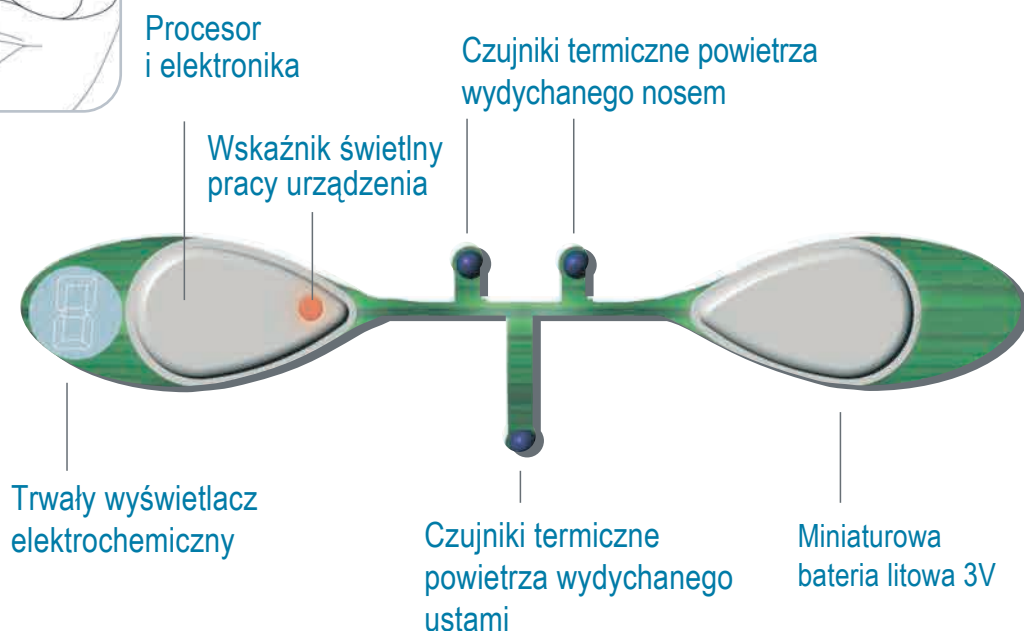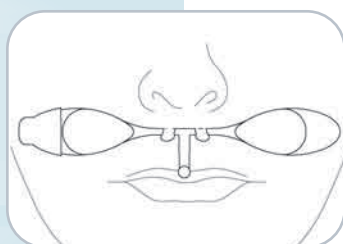

Czy można samodzielnie wykryć Bezdech Senny?

Wystarczy po prostu spojrzeć na SleepStrip i samemu odczytać wynik:



Mniej niż 15 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny – nie ma bezdechu sennego



15 do 24 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny – łagodny bezdech senny



25 do 39 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny – umiarkowany bezdech senny



40 lub więcej zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny – nasilony bezdech senny



Błąd – zbyt krótki czas badania lub inne problemy

Jednorazowe czujniki SleepStrip zapewniają najłatwiejszą, najbardziej zaawansowaną, najekonomiczniejszą i najdokładniejszą metodę wykrywania Bezdechu Sennego.

Dokładność SleepStrip potwierdzona została przez wiodące międzynarodowe ośrodki certyfikujące. SleepStrip jest kompletnym systemem typu “wszystko w jednym”. Nie wymaga żadnych dodatkowych składników ani oprzyrządowania. Wyniki odczytuje się rano, po badaniu, bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu.

Jak działa SleepStrip®

Trzy miniaturowe czujniki monitorują oddech pacjenta przez całą noc. Zintegrowany procesor analizuje regularność oddechu, wykrywając i licząc każdy bezdech i spłycony oddech, jeśli takie wystąpią. Następnego dnia rano wyliczony jest stopień nasilenia Bezdechu Sennego na podstawie wskaźnika AHI (Apnea Hypopnea Index) pacjenta oraz zapisu na wbudowanym wyświetlaczu elektrochemicznym.

Dystrybutor:



ul. K. Jeżewskiego 5c/6, 02-796 Warszawa
tel. (022) 644 37 22, fax (022) 644 37 27
e-mail: meddwe@meddwe.pl
www.meddwe.pl

S.L.P. Ltd.

P.O.Box 14014,

Tel-Aviv, 61140, Israel

Tel: +972-3-5371281

Fax: +972-3-5371282

E-mail: info@slp-med.com